

冷凍監視片使用說明

■構造及用途

裝有顏色液體的小球並墊有白紙之指示劑。用於監控不可被凍結之疫苗於運送及儲存過程中，溫度是否暴露低於 0°C 以下，如使用於 HBV、PCV、Flu、JE、Td、五合一.. 等不活化疫苗。



效期至 2015 年
12 月 31 日

■效期

標示於監視片右下方。

■判讀方式

- 查看冷凍監視片球體是否有破裂及後墊白紙是否有染色情形。
- 拿出冰箱外搖晃，並同時觀察球體內之液體是否有**流動狀況**，若有流動則應無破裂。



☛ 使用注意事項：

- 與 HBV、JE、PCV、五合一等對冷敏感且不可凍結之不活化疫苗置放一起。
- 避免冷凍監視片直接接觸冰寶而造成破裂。
- 未使用時，應儲存於 32°C 以下， 5°C 以上之陰涼環境。
- 建議於屆效期前三個月，即汰換新凍片。