

A 類感染性物質 P620 包裝送驗說明

檢體包裝	說明
	<p>準備好符合 P620「專用檢體容器」2 個及「專用運送箱」1 個。</p>
	<ol style="list-style-type: none">1. 裝檢體之病毒拭子及無菌真空管(紅頭), 在容器外壁上註明個案檢體資料; 例如: 姓名、採檢日期、檢體種類及條碼。如為避免採檢器材表面污染, 可先裝入夾鏈袋封好。2. 打開專用檢體容器, 將病毒拭子、無菌真空管(紅頭管)插入圓形海棉固定。
	<ol style="list-style-type: none">3. 將專用檢體容器之橘蓋鎖緊(若病毒拭子長度較長, 蓋子請稍微傾斜順向鎖緊)。

	<p>大型冷藏型冰寶八片(前後各三片，旁邊各一片)，可以維持低溫(8°C 以下)至少 18 小時。</p>
	<p>將「防疫檢驗檢體送驗及報告單」第一聯置於一大型夾鏈袋中密封，再置於保麗龍盒外。</p>
 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 檢體運送箱以膠帶封箱。 2. 封口貼紙填上送驗單位、送驗人、電話、傳真及檢體件數，貼於檢體運送箱外封口處。 3. 檢體運送箱請用大型透明塑膠袋包裝，以利運送。