

## 卡介苗稀釋後保冷容器建議使用方式

疾病管制署配發之保冷容器經多人測試後，建議使用方式說明如下：

- 務必裝入 250 ml 清水(勿過多或過少)後，置於冷凍庫結冰，如此冰塊體積較能有效維持容器內部 2-4°C 之低溫，且冰面高度適中，加蓋後亦可有效避免卡介苗瓶口碰觸容器上蓋而污染。惟請留意!! 杯蓋及疫苗置放架應置於**常溫處**，切勿與容器一併放置於冷凍庫，避免加速劣化。

### 稀釋後卡介苗疫苗專用保冷設備 使用說明書

#### 配件說明



保冷罐x1



卡介苗置放架x1

#### 注意事項

請避免放置於酷熱或極寒的環境中（如烤爐或冰箱）

- 使用前請務必提早將保冷杯自冷凍庫取出，並放入高低溫度計監測容器內溫度。倘為零度以下，請先放置於常溫處，待容器內溫度回溫至 2°C 左右，再放入疫苗置放架。
- 疫苗置放架內務必放入乾棉球，勿使卡介苗直接接觸置放架底部以減少低溫傳導，並達到緩衝避免碰撞破裂。
- 保冷杯使用過程中，盡量減少杯蓋打開的次數和時間（請參考卡介苗接種技術操作），以維持保冷之效果。
- 使用完畢後請記得放回冷凍庫，確保冰塊確實結冰。

